

保管用

THRIVE


保証書付

Hogbees

ホグビーズ

マッサージャー CMD-7000

取扱説明書

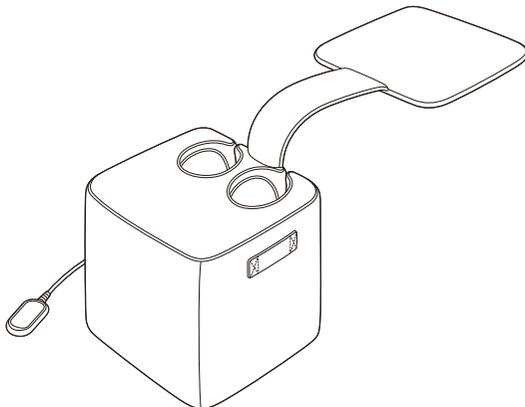

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

使用目的または効果

あんま、マッサージの代用

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

一般家庭で使用すること

もくじ

- 安全上のご注意……………1～5
- 各部の名称……………6
- ご使用の前に……………7
- 使いかた……………7～9
- 使用例……………9・10
- 使用上のご注意……………10
- お手入れについて……………10・11
- 保管について……………12
- 故障かなと思ったら……………12
- 愛情点検について……………12
- 仕様……………13
- アフターサービスについて…14・15
- メモ……………16・17
- 無料修理規定……………18
- 保証書……………裏表紙

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意

人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例



⊘記号は、「禁止」の行為を示しています。(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制指示するものです。(左図の場合は電源プラグを抜く)

- お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。



警告



禁止

次の人は使用しない。
医師からマッサージを禁じられている人。
(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)
症状を悪化させる原因になります。

頭、首、胸、腹、骨部へは使用しない。
事故やけがの原因になります。

乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせない。
事故やけがの原因になります。

安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。
事故やけがの原因になります。



警告



禁止

本体の上に立たない。
また、脚エアーバッグに足を入れたまま立ち上がらない。
落下や転倒による事故やけがの原因になります。

子供には本体の上に乘せたり遊ばせたりしない。
事故やけがの原因になります。

キャスター付きの椅子に座って使用しない。
転倒による事故やけがの原因になります。

本体内部に金属類や燃えやすいものを入れない。
感電やショート、火災の原因になります。

付属以外のACアダプターで使用しない。
また、付属のACアダプターで他の電気製品には使用しない。
発熱や発火、感電、けが、故障の原因になります。

電源コードやACアダプター、器具用プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。電源コードやACアダプター、器具用プラグが破損した場合は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに修理を依頼する。そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。

電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体やACアダプターに巻きついたりしない。また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。
感電や火災の原因になります。

フンや毛布をかぶせたり、コタツの中に入れて使用しない。
発火やモーターの温度上昇による故障の原因になります。

ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。
また、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない。
火災の原因になります。

水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しない。
感電やショート、故障、色移りやカビ発生の原因になります。



水場使用禁止

浴室など湿度の高い場所では使用しない。
感電やショート、故障、色移りやカビ発生の原因になります。



分解禁止

機器が故障および破損したり、エアーバッグの張地が破れた場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡する。電源コードが破損した場合は危険ですので電源コードの交換はお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに交換の依頼をする。
機器は改造しない。
感電や火災、けがの原因になります。

安全上のご注意

警告

 <p>強制</p>	<p>医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●けんしょう(腱鞘)炎の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●本品を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の人 <p>事故や体調不良をおこす原因になります。</p>
	<p>使用前に必ずエアークッションの張地が破れていないか確認する。(どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。)</p> <p>けがの原因になります。</p>
	<p>本体内部に封入されているビーズが漏れて目や鼻に入ったり、吸い込んだ場合はただちに医師に相談する。</p> <p>窒息や誤飲による事故の原因になります。</p>
	<p>ACアダプターは交流100Vで使用する。</p> <p>感電や火災の原因になります。</p>

注意

 <p>禁止</p>	<p>次のようなときは使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき <p>体調不良をおこす原因になります。</p>
	<p>食前、食後の1時間は使用しない。</p> <p>体調不良をおこす原因になります。</p>
	<p>他の治療器具と同時に使用しない。</p> <p>体調不良をおこす原因になります。</p>
	<p>使用前に必ずエアークッションの中に異物がないことを確認する。</p> <p>事故やけが、故障の原因になります。</p>

 <p>禁止</p>	<p>使用中は眠らない。</p> <p>事故やけがの原因になります。</p>
	<p>肌の弱い人は素肌で使用しない。</p> <p>けがややけどの原因になります。</p>
	<p>マッサージをしない状態で動作させない。</p> <p>エアークッションの耐久性が低下する原因になります。</p>
	<p>治療部位にアクセサリなどの硬いものをつけて使用しない。</p> <p>エアークッションに接触して事故やけが、故障の原因になります。</p>
	<p>二人以上で同時に使用しない。</p> <p>事故やけが、故障の原因になります。</p>
	<p>使用中にACアダプターや器具用プラグを抜かない。</p> <p>けがの原因になります。</p>
	<p>1回の使用時間は10分以内にする。</p> <p>1日の使用時間は30分以内にする。</p> <p>長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やけがの原因になります。</p>
	<p>周囲に障害物のない水平な床に置いて使用する。</p> <p>事故やけがの原因になります。</p>
	<p>脚エアークッションのファスナーは一番上まで引き上げた状態で使用する。途中で止めたり、無理やり引き上げない。</p> <p>ファスナーが破損する原因になります。</p>
	<p>はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用する。</p> <p>強い刺激に慣れていないと逆効果やけがの原因になります。</p>
 <p>強制</p>	<p>使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。</p> <p>事故や体調不良をおこす原因になります。</p>
	<p>使用後は停止ボタンで動作を止め、ACアダプターをコンセントから抜き、子供の手の届かないところに保管する。本品で遊ぶことがないよう子供を監視する。</p> <p>子供のいたずらによる事故やけがの原因になります。</p>
	<p>ACアダプターをコンセントから抜くときは電源コードを持たず、必ずACアダプターを持って引き抜く。器具用プラグをソケットから抜くときは電源コードを持たず、必ず器具用プラグとソケットを持って引き抜く。</p> <p>感電やショート、故障の原因になります。</p>



安全上のご注意

⚠ 注意


 強制	<p>座エアバッグを持って振り回さない、引っ張らない、引きずらない。 本体を投げたり、強い衝撃をあたえない。 エアホースカバーをねじらない、無理に曲げない。 破損の原因になります。</p>
	<p>本品を移動させる際は、必ず両手で持ち手を持ち、座エアバッグやエアホースカバー部を持って移動しない。 また、座エアバッグを無理に引っ張らない。 エアホースが破損する原因になります。</p>
	<p>鋭利な物を近くに置いたり乗せたりしない。 破損の原因になります。</p>
	<p>お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯、アイロンやドライヤーは使用しない。 変色、変形の原因になります。</p>
	<p>長時間同じ場所に置かない。 製品と床や壁などに色移りやカビ発生の原因になります。</p>
	<p>直射日光の当たる場所で保管しない。 変色、劣化の原因になります。</p>
 電源プラグを抜く	<p>使用時以外はACアダプターをコンセントから抜く。 ホコリの付着や湿気などで絶縁不良になり、漏電火災の原因になります。</p>
	<p>お手入れの際は、ACアダプターをコンセントから抜く。 また、ぬれた手でACアダプターにふれない。 感電ややけどの原因になります。</p>
	<p>停電のときはACアダプターをコンセントから抜く。 停電復帰時に事故やけがの原因になります。</p>

各部の名称

本体

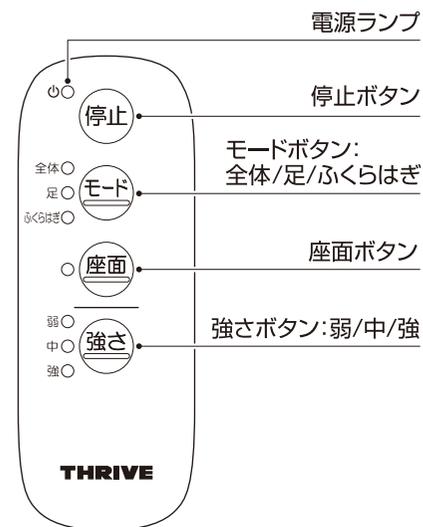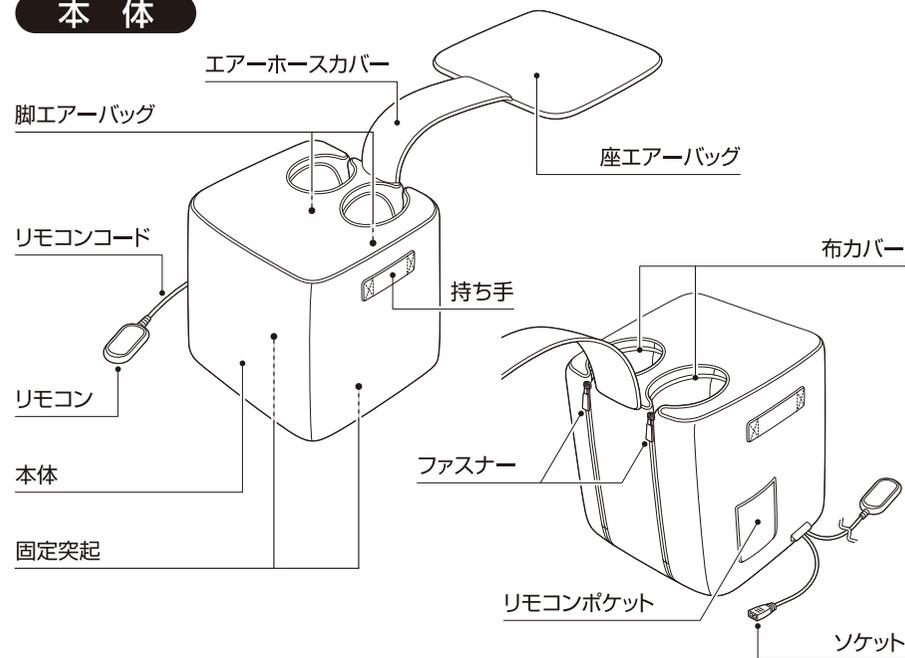

付属品

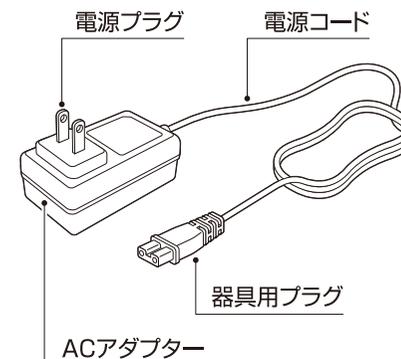

● 付属品のACアダプターは同梱されているものをお使いください。

ご使用の前に


使用前に必ずエアバッグの張地が破れていないか確認し、破れがあるときはただちに使用を中止してください。

- エアバッグの張地を外した状態や破れた状態で使用しないでください。破れた場合は使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼してください。
- 周囲に障害物のない水平な床に置いて使用してください。
- 施療部位にアクセサリーなどの硬いものをつけて使用しないでください。事故やけが、故障の原因になります。
- 頭、首、胸、腹、骨部へは使用しないでください。事故やけがの原因になります。
- キャスター付きの椅子に座って使用しないでください。
- 使用中の動作音をやわらげるとともに床を傷つけないためにマットなどを敷くことをおすすめします。
- 器具用プラグをソケットに差ししてください。(抜け落ちないよう確実に接続する)
- ACアダプターをコンセントに差ししてください。(抜け落ちないよう確実に接続する)ピッと音がして電源ランプが点灯します。
- リモコンの各操作ボタンが正しく動作するか確認してください。
- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。

使いかた

本体と座エアバッグの設定

1. 椅子の前に本体を設置してください。
2. 座エアバッグを椅子の座面に設置してください。
 - エアホースカバーはねじったり、無理に曲げないでください。

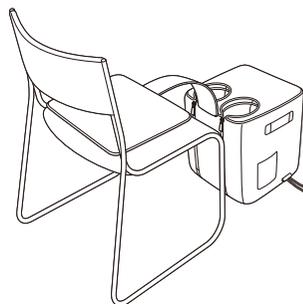

脚エアバッグに足を入れる。

- ファスナーが上がった状態で脚エアバッグに足を入れてください。
- 足が入らない場合は、以下の手順で足を入れてください。



1. 脚エアバッグのファスナーを下まで下げてください。
2. 両足を入れてください。
3. 脚エアバッグのファスナーを一番上まで引き上げてください。
 - ファスナーは途中で止めたり、無理やり引き上げないでください。ファスナーが破損する原因になります。
 - 衣服を挟まないように注意してください。




1. **モード** ボタンを押すと動作を開始します。

ボタンを押すごとに3種類のモードが[全体]→[足]→[ふくらはぎ]の順番に切り替わり、各エアバッグが空気力で包み込むように加圧し、その後減圧する動作をくり返しながらかマッサージを行います。

[全体] ———— 足先からふくらはぎまでを段階的に加圧、減圧しながらマッサージをします。

[足] ———— 足先と足首のエアバッグを中心に加圧、減圧しながらマッサージをします。

[ふくらはぎ] ———— ふくらはぎと足首のエアバッグを中心に加圧、減圧しながらマッサージをします。

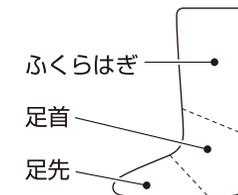

エアバッグのイメージ図

1. **座面** ボタンで[座エアバッグ]が動作します。お好みで[入][切]を切り替えます。

動作開始時は[入]に設定されていますので、お好みで[入][切]を切り替えてください。

- 座エアバッグのみを単独で動作させることも可能です。

1. **強さ** ボタンを押すごとにエアバッグの強さが[弱]から[中][強]の順番に切り替わります。

動作開始時は[弱]に設定されていますので、お好みで選択してください。

2. マッサージをやめたいときは(停止)ボタンを押してください。

急いでマッサージを中止したいときは(停止)ボタンを押してください。

3. ACアダプターをコンセントから抜いてください。

4. 器具用プラグをソケットから抜いてください。






警告

1回の使用時間は10分以内にする。
1日の使用時間は30分以内にする。
長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やけがの原因になります。

オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。


使用例

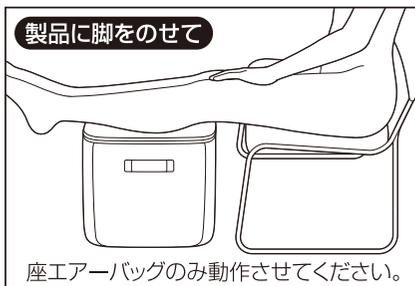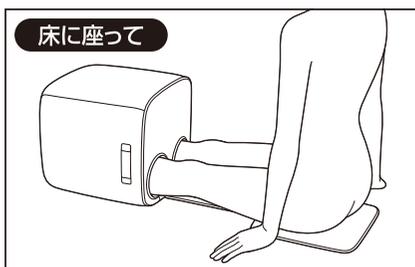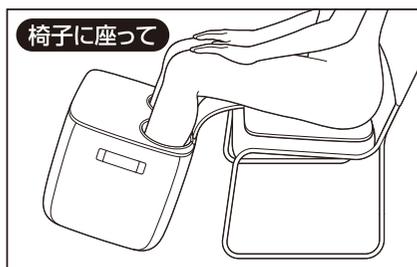

● 肌の弱い人は素肌では使用しないでください。

製品の収納方法

エアースカパー

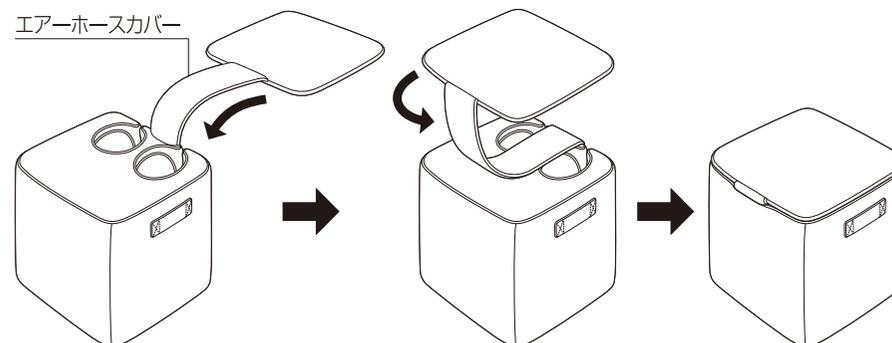

● エアースカパーを折りたたむように収納してください。

使用上のご注意

- 整髪料・化粧品などの薬品を接触させないでください。
化学変化による生地の変色や劣化の原因になります。
- 直射日光を毎日長時間あてないでください。
生地の変色や劣化の原因になります。
- ビニールや室内の壁紙などに長時間接触させないでください。
色移りやカビ発生の原因になります。
- ベットの爪などによる引っ掛けや破れ、排せつ物による汚れに注意してください。
- ご購入直後の使用時にビーズ特有のニオイがする場合があります。通気を良くしてお使いいただくことで通常は時間の経過とともにニオイが低減していきます。

お手入れについて

本体

乾いた布で汚れをふき取ってください。

シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。

変色、変形の原因になります。

布カバー

布カバーはファスナーで

取り外してご家庭で洗濯できます。

品質表示



1.洗濯機で洗う場合

- 40℃以下の液温で弱めに洗ってください。
- 生地が傷みやすいので、洗濯ネットのご使用をおすすめします。
- 塩素系および酸素系の漂白剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。
- 乾燥機(乾燥機能)は使用しないでください。
- 洗濯後直ちに干してください。
- 軽くしわをのばし、日陰干してください。天日干しすると、生地の縮みや色あせの原因になります。


2.アイロン仕上げをする場合

- 150℃以下の底面温度で仕上げてください。

3.ドライクリーニングに出す場合

- パークロロエチレンおよび石油系のドライクリーニングをご依頼ください。

布カバーの取り外しかた

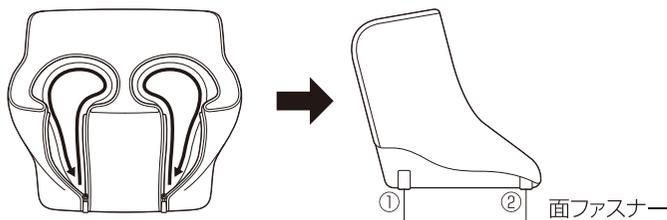

脚エアーバッグのファスナーの内側にある布カバーのファスナーを開いてください。

布カバーの底部にある2箇所面のファスナーに注意して取り外してください。

布カバーの取り付けかた



2箇所の面ファスナーの位置を確認してください。

脚エアーバッグ底部にある面ファスナーと密着させてください。

取り外したときの逆の手順でファスナーを閉じて、布カバーを取り付けてください。

保管について

- 汚れやホコリをとったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- しばらくご使用にならないときはカバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- 電源コードやリモコンコードはねじれをほどいて保管してください。

故障かなと思ったら

点検、修理を依頼される前に下記のご確認をお願いします。

症 状	調べるところ
● マッサージ中の音 加圧および減圧の音 張地のすれる音(バリバリ音)	● 構造上発生するもので機能に影響はありません
● 動作しない、動作が止まる	● ACアダプター、器具用プラグが抜けていませんか ● オートタイマーが動き停止状態になっていませんか

症 状	直し方
● 連続使用時にマッサージが止まる	● モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています しばらく本体を休ませて(2時間程度)から再度動作を確認してください

機器に異常音や動作しないなどの異常や故障が発見された場合は使用をただちに中止しACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

 愛情点検	<p>このような症状はありませんか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● こげくさいにおいがする ● 電源コード、ACアダプターが異常に熱い ● コードを動かすと通電したりしなかったりする ● その他異常がある 		<p>故障や事故防止のため使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いて、必ずお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理をご相談ください。</p>
----------	--	--	---

仕様

販売名	マッサージャー CMD-7000
医療機器認証番号	305AHBZX00033000
医療機器の種類	管理医療機器
一般的名称	家庭用エアマッサージ器
定格	AC100V 50/60Hz 20W
ACアダプター	WL2400-1000
定格時間	20分
エア圧力	80kPa以下
オートタイマー	約10分
外形寸法	幅 約40cm×奥行 約40cm×高さ 約40cm (座エアバッグを本体に乗せた状態)
質量	約4kg
電源コード長さ	約1.8m
材質	本体:ポリエステル 布カバー:ポリエステル エアバッグ:ポリエステル ビーズ:ポリスチレン
付属品	ACアダプター
製造販売元	大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙)
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
弊社は補修用性能部品の製造打ち切り後最低6年間保有しております。
ただし、縫製部品は除きます。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他ご不明な場合
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または
お客様ご相談センターにお問い合わせください。

**地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで
各自治体の取り決めにしたがってください。**

〈無料修理規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店または、P15のお客様ご相談センターが無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店または、P15のお客様ご相談センターに依頼してください。
3. ご転居の場合には事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼にできない場合には、P15のお客様ご相談センターにご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合の故障および損傷
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (ト) 指定外電源(電圧・周波数)使用による損傷
6. 本書は国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または、P15のおお客様ご相談センターにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはP14をご覧ください。

THRIVE

スライヴ

保証書

持込修理

マッサージャー CMD-7000

お買い上げ日	保証期間
年 月 日	お買い上げ日より1年間

お客様	
フリガナ	
お名前	様
住所 〒	
電話番号	
販売店	

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売などで購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げ販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

P18の無料修理規定をご覧ください。

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38