


保管用

保証書付

# くつろぎ指定席 マッサージチェア CC-95

## 取扱説明書

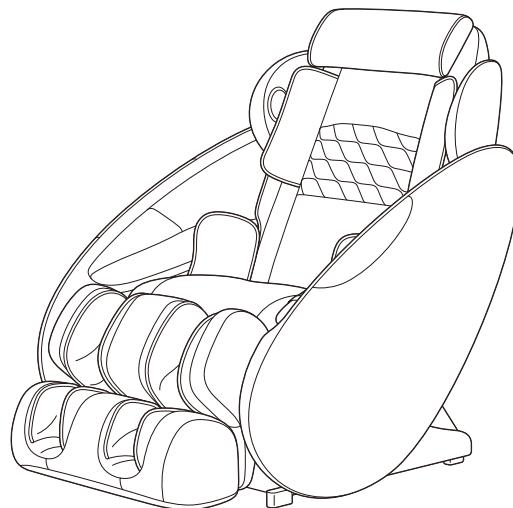

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございました。  
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。  
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

### 使用目的または効果

#### あんま、マッサージの代用

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の緩解

#### 一般家庭で使用すること

### もくじ

● 安全上のご注意	1~3
● 各部の名称とはたらき	4・5
● マッサージの前に	6・7
● 使用方法	8~11
● 使い終わったら	11
● スピーカーの使用方法	12
● Bluetooth®について	12・13
● 使用上のご注意	13
● お手入れについて	13
● 保管について	14
● 故障かなと思ったら	14
● 愛情点検について	15
● 仕様	15
● アフターサービスについて	16・17
● 無料修理規定	18
● 保証書	裏表紙

## 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例



●記号は、「禁止」の行為を示しています。(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制・指示するものです。(左図の場合は電源プラグを抜く)

- お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに必ず保管してください。

## ！ 警告



禁止

次の人は使用しない。  
医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)  
症状を悪化させる原因になります。

病院内や本品以外の医療用電気機器のある場所、自動ドアや火災報知器の近くで使用しない。  
本品からの電波で各機器に影響を及ぼし、誤動作による事故の原因になります。

ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人は  
使用しない。  
本品からの電波で機器に影響を及ぼし、誤動作による事故の原因になります。

マッサージ以外の目的に使用しない。また、頭、胸、腹、骨部へは使用しない。  
事故やけがの原因になります。

乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせない。  
事故やけがの原因になります。

安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。  
事故やけがの原因になります。

子供には本体の上に乗らせたり遊ばせたりしない。  
事故やけがの原因になります。

強く押しつけて使用しない。  
皮膚や筋肉を痛める原因になります。

本体の上に立ったり、座面以外の場所に座らない。  
転倒による事故やけが、故障の原因になります。

電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。  
電源コードや電源プラグが破損した場合は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに修理を依頼する。  
そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。

電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしない。  
また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。  
感電や火災の原因になります。



禁止

ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。  
また、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない。  
火災の原因になります。

アース線はガス管、電話線、避雷針、水道管(途中がプラスチック)などに接続しない。  
感電や火災・事故の原因になります。

水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しない。  
感電やショート、故障の原因になります。

Bluetooth接続前に接続する機器の音量をあらかじめ下げる。  
音量は接続時は小さくし、少しづつ上げて調節する。  
音量を上げた状態で接続すると、突然の大きな音で聴力に悪影響をあたえる原因になります。

大音量で耳を刺激しない。  
大音量での長時間の使用は聴力に悪影響をあたえる原因になります。



分解禁止

機器が故障したり張地が破れた場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡してください。電源コードが破損した場合、危険ですので電源コードの交換はお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに交換の依頼をしてください。  
機器は改造しないでください。  
火災や感電、けがの原因になります。



水場使用禁止

浴室など湿度の高い場所では使用しない。  
感電やけが、故障の原因になります。



強制

医師の治療を受けているときや次の人には必ず医師に相談のうえ使用する。

- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠中や出産直後の人は
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)

事故や体調不良をおこす原因になります。

使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。  
また、その他の部分にも破れがないか確認する。

どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。  
けがや感電の原因になります。

背もたれ、フットレストを動作するときは、必ず周囲に人やペットがいないことを確認する。  
またフットレストのすき間に足や手、身体を入れない。  
事故やけがの原因になります。

交流100Vで使用する。  
火災や感電の原因になります。

電源プラグを定期的に掃除する。  
ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり漏電火災の原因になります。

## ！ 注意



禁止

次のようなときは使用しない。

- 疲労が激しいとき
- 酒に酔っているとき
- 湿疹が生じているとき

体調不良をおこす原因になります。

食前、食後の1時間は使用しない。  
体調不良をおこす原因になります。

肌の弱い人は素肌で使用しない。  
けがややけどの原因になります。

フットレストと本体の間に足や手、身体を入れない。  
事故やけがの原因になります。



首の周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意し、過度に強いマッサージをしない。  
逆効果やけがの原因になります。

もみ玉へ無理な力をかけたり、長時間の連続使用はしない。  
安全装置が働き動作が止まることがあります。

	<p>他の治療器具と同時に使用しない。 体調不良をおこす原因になります。</p> <p>使用中は眠らない。 事故やけがの原因になります。</p> <p>背もたれ、フットレストを持って移動しない。 事故やけがの原因になります。</p> <p>背もたれが倒れフットレストが上がった状態で椅子の乗り降りをしない。 転倒による事故やけが、故障の原因になります。</p> <p>座らない状態でフットレストに負荷をかけない。 転倒による事故やけがの原因になります。</p> <p>人または物のせたまま移動しない。 転倒による事故やけがの原因になります。</p> <p>施療部位にアクセサリーなどの硬いものをつけて使用しない。 機構部に接触してけがの原因になります。</p> <p>ポケットの中に入れて使用しない。 エアーバッグに接触して事故やけが、ものの破損の原因になります。</p> <p>使用中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを切らない。 故障の原因になります。</p> <p>お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯、アイロンやドライヤーは使用しない。 変色・変形の原因になります。</p>
	<p>1回の使用時間は15分以内にする。 また、一箇所への連続使用は3分以内にする。 1日の使用時間は30分以内にする。 長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やけがの原因になります。</p> <p>はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用する。 強い刺激に慣れないと逆効果やけがの原因になります。</p> <p>もみ玉の位置を確認したうえで、ゆっくり座る。 身体をまっすぐにして、首および背骨が左右のもみ玉の間にくるようにする。 事故やけがの原因になります。</p> <p>エアーチューブプラグ内やエアーチューブプラグ受けにホコリなどを入れない。 異音発生などの故障の原因になります。</p> <p>座らない状態でエアーマッサージを動作しない。 エアーバッグの耐久性が低下する原因になります。</p> <p>使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。 事故や体調不良をおこす原因になります。</p> <p>水平な場所で使用する。 本体が倒れて事故やけがの原因になります。</p> <p>畳やフローリングなど傷つきやすい床の上で使用する場合は、マットなどを敷く。 床が傷つく原因になります。</p> <p>使用後は電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜く。 本品で遊ぶことがないように子供を監視する。 子供のいたずらによる事故やけがの原因になります。</p> <p>使用後は電源コードのねじれをほどいて保管する。 断線やショートの原因になります。</p> <p>電源プラグを抜くときは、接続部に無理な力をかけないよう、必ず電源プラグを持って引き抜く。 感電やショート、故障の原因になります。</p> <p>故障が見つかったら、すぐに使用を止め、電源プラグをコンセントから抜く。 事故やけがの原因になります。</p>
	<p>アースを確実に取り付ける。 故障や漏電のときに感電の原因になります。</p>
	<p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災の原因になります。</p> <p>お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手でプラグにふれない。 感電ややけどの原因になります。</p> <p>停電のときはただちに電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜く。 停電復帰時に事故やけがの原因になります。</p>

## 各部の名称とはたらき


### 本 体

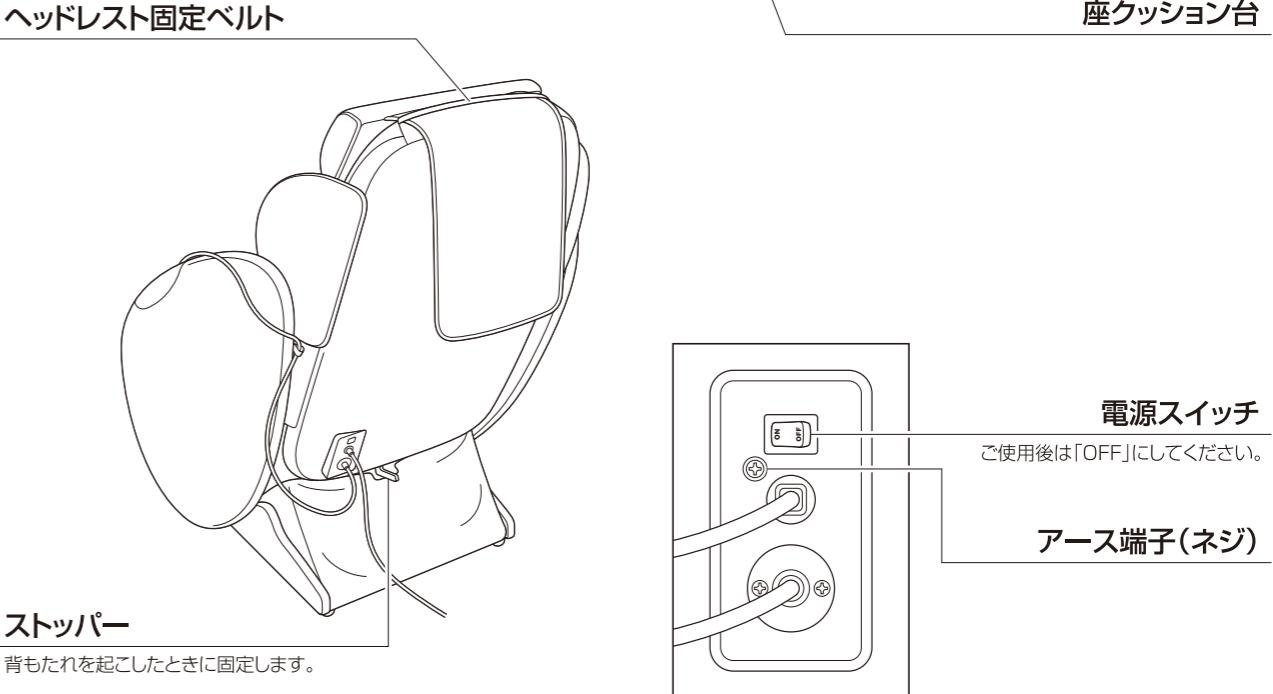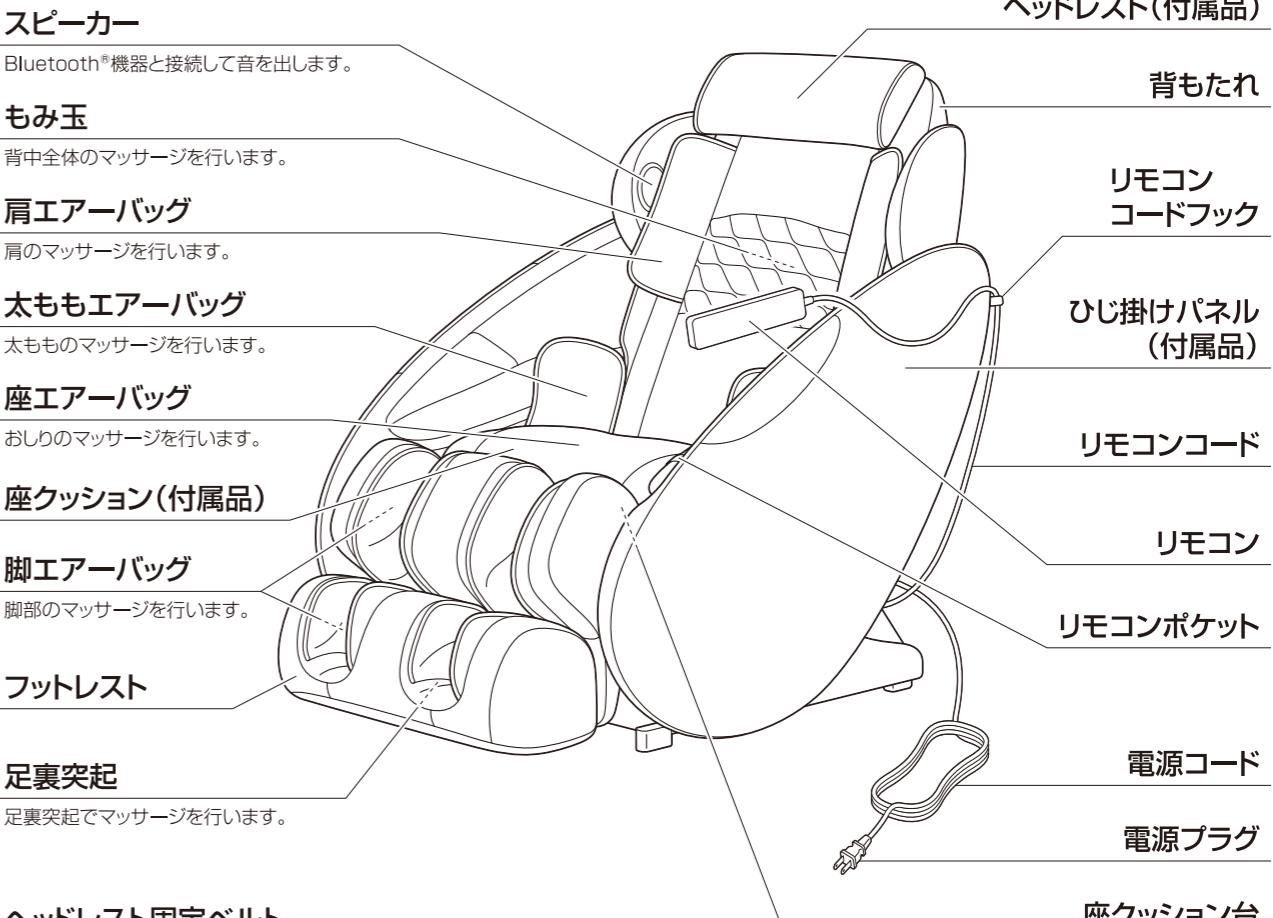

●付属品は必ず同梱されているものをお使いください。

# 各部の名称とはたらき


## リモコン

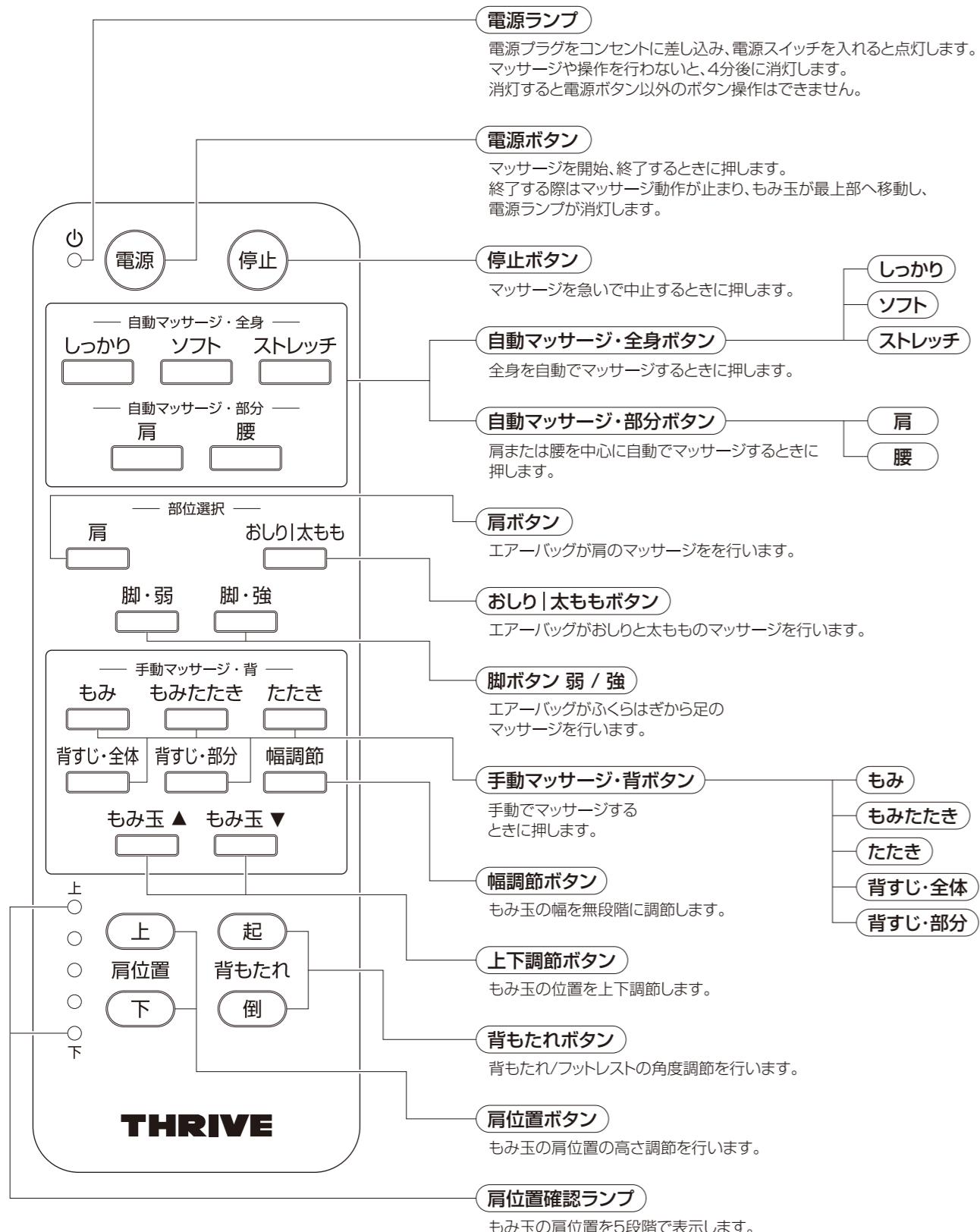


# マッサージの前に

## 組み立て方


1.ストッパーが「カチッ」と音がするまで背もたれを矢印の方向に起こしてください。  
このとき、電源コード、リモコン、リモコンコードを挟まないようにしてください。

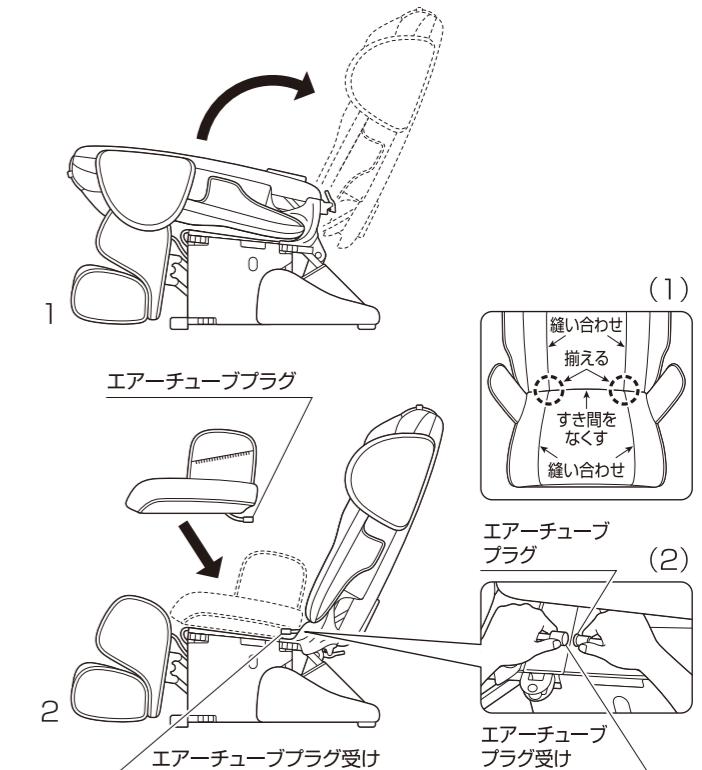

2.エアーチューブプラグの接続と、座クッションをセットしてください。  
(1)座クッションの裏面にあるエアーチューブプラグと座クッション台のエアーチューブプラグ受けを「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。  
(2)背もたれの2本の縫い合わせと座クッションの2本の縫い合わせを揃えながら、背もたれと座クッションの間にすき間ができるないようにセットしてください。

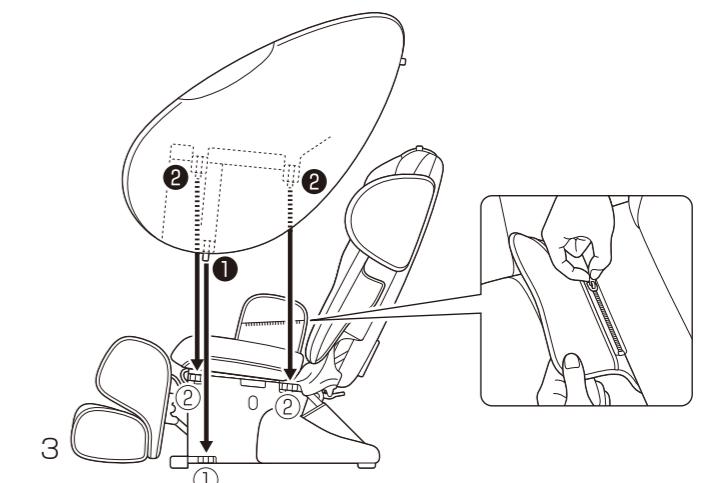


3.ひじ掛けパネルを本体にセットしてください。  
(1)はじめに、ひじ掛けパネルのバネ付き突起①を突起受け①に合わせ、次に突起②(2箇所)をロック付きの突起受け②(2箇所)に合わせます。最後にひじ掛けパネルを真下に下ろし、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。  
(2)ひじ掛けパネル内側にあるファスナーと、座クッション横の太ももエアーバッグにあるファスナーを閉めてください。

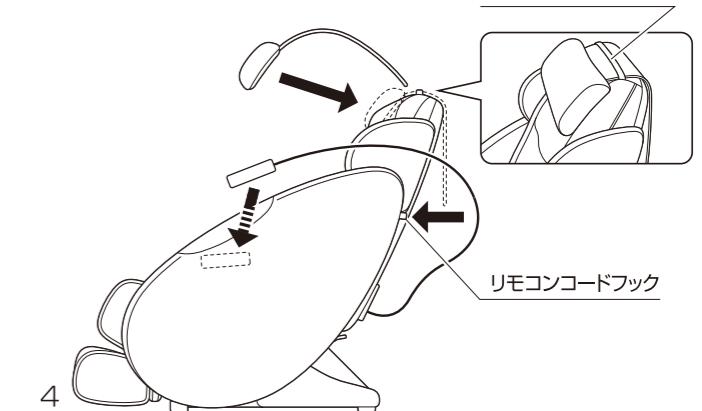

4.ヘッドレストを背もたれのヘッドレスト固定ベルトに通してセットしてください。  
リモコンをひじ掛け内側のリモコンベルトにセットし、リモコンコードをリモコンコードフック(面ファスナー)で留めてください。

## 設置のしかた

- 背もたれを倒した状態で背もたれの後ろに30cm以上、フットレストを上げた状態でフットレストの前に30cm以上のすき間をあけて水平な場所に設置してください。
- ホットカーペットなどの暖房器具の上に設置しないでください。
- 直射日光が長時間あたるところに設置しないでください。  
合成皮革が変色や変質する原因になります。
- 畳やフローリングなど傷つきやすい床の上で使用する場合は、本体の下にマットなどを敷いてください。
- 重量物ですので必ず2人以上で運んでください。
- 移動するときは、ひじ掛けパネルの下を持ち（背もたれやフットレストは持たないで）移動してください。

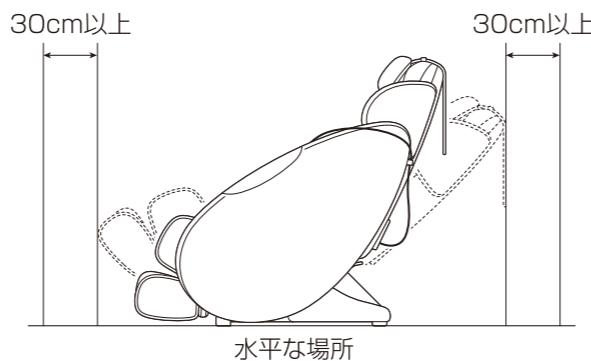

## アースについて


- アース線を本体のアース端子（ネジ）と電源コンセントのアース端子に取り付けてください。

### 電源コンセントにアース端子がない場合

- お買い上げの販売店、電気工事店に相談し  
アース工事（D種〈第三種〉接地工事）をしてください。  
(アース工事費は本製品の価格には含まれておりません)

### 取り付けてはいけないところ

- ガス管………爆発や引火の原因になります。
- 電話線や避雷針……落雷のとき、感電や発火の原因になります。
- 水道管………途中からプラスチックの場合はアースになりません。

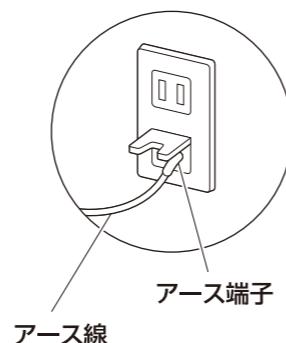

## ご使用前の確認

使用前に必ず張地が破れていないか確認し、  
破れがあるときはただちに使用を中止してください。

- 張地を外した状態や破れた状態で使用しないでください。  
破れた場合は使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。
- 施療部位にアクセサリーなどの硬いものをつけたまま使用しないでください。  
事故やけが、故障の原因になります。
- 頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。事故やけがの原因になります。
- 電源プラグが確実に接続されているか確認してください。
- リモコンの各ボタンがすべて正しく動作するか確認してください。
- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。

<b>⚠ 警告</b>	子供には本体の上に乗せたり遊ばせたりしない。 使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。 また、その他の部分にも破れないか確認する。 どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。 けがや感電の原因になります。
-------------	--

<b>⚠ 注意</b>	1回の使用時間は15分以内にする。 また、一箇所への連続使用は3分以内にする。 1日の使用時間は30分以内にする。 長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やけがの原因になります。
-------------	--


## 使用方法

### 電源の入れ方

- 1.電源プラグを差し込む前に、背もたれ背面下の電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
- 2.電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 3.電源スイッチを「ON」にしてください。電源ランプが点灯します。

### 背もたれとフットレストの角度調節

リモコンの背もたれ（起）（倒）ボタンを押すと、背もたれと連動してフットレストが上下します。  
背もたれのリクライニング角度は床面に対して約113°から約137°の間で調節できます。

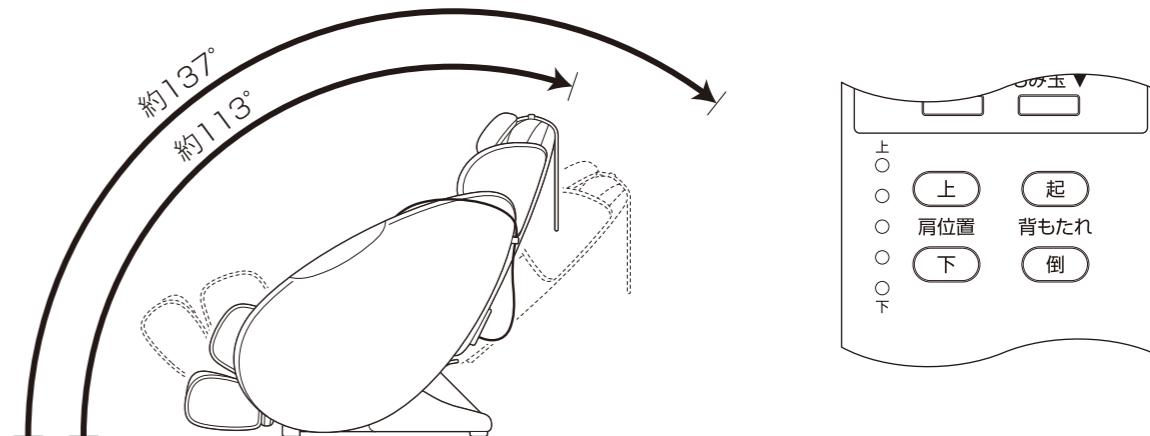


背もたれ、フットレストを動作するときは、必ず周囲に人やペットがいないことを確認する。  
またフットレスト、背もたれのすき間に足や手、身体を入れない。  
事故やけがの原因になります。

### フットレストの延伸について

背の高い人や脚の長い人が使用する際にフットレストを最長で約14cm伸ばすことができます。



フットレストが上がった状態で足で押し出してください。

- フットレストを伸ばすときは、床を傷つけないようにゆっくり伸ばしてください。

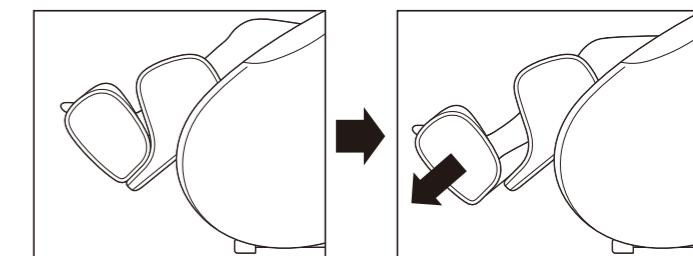

## 肩位置の設定

- 深く腰かけ、頭を背もたれにつけて、ゆったりもたれてください。
- もみ玉が首をマッサージできるようにヘッドレストの位置を調節してください。
- 肩位置(上)(下)ボタンを押して、もみ玉の位置を5段階から選んでください。  
ご使用ごとに肩位置の設定が必要です。
- もみ玉が適切な位置に当たらないときは、身体をずらして調節してください。

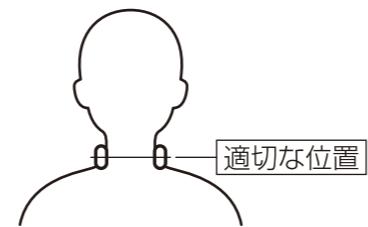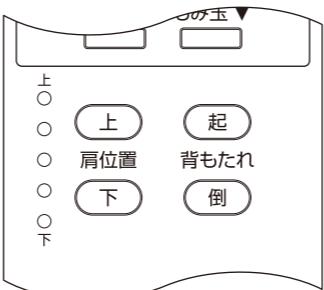


## 自動マッサージ・全身 / 自動マッサージ・部分

- 施療部を効果的にマッサージするようにあらかじめ設定された5種類の自動マッサージからお選びいただけます。

- 自動マッサージ・全身  
[しっかり] .....背中全体を自動でマッサージします。(たたき動作多め)
- 自動マッサージ・全身  
[ソフト] .....背中全体を自動でマッサージします。(たたき動作少なめ)
- 自動マッサージ・全身  
[ストレッチ] .....背すじを中心でマッサージします。
- 自動マッサージ・部分  
[肩] .....肩を中心でマッサージします。
- 自動マッサージ・部分  
[腰] .....腰を中心でマッサージします。

- 5種類の自動マッサージは [もみ] [もみたき] [たたき] [背すじ・全体] [背すじ・部分] のすべてのマッサージ機能が単独、複合動作します。
- 部位選択は好みで切り替えが可能です。

- マッサージをやめたいときに(電源)ボタンを押すと、マッサージ動作が止まり、電源ランプが点滅しながらもみ玉が最上部へ移動し、電源ランプが消灯します。  
マッサージを急いで中止したいときに(停止)ボタンを押すと、全ての動作が停止します。
- 刺激が強すぎるときはタオルなどをあてがい、もみ玉の感触を調節してください。  
強い刺激のままで使用を続けるとけがの原因になります。
- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。  
強い刺激に慣れていないと逆効果やけがの原因になります。

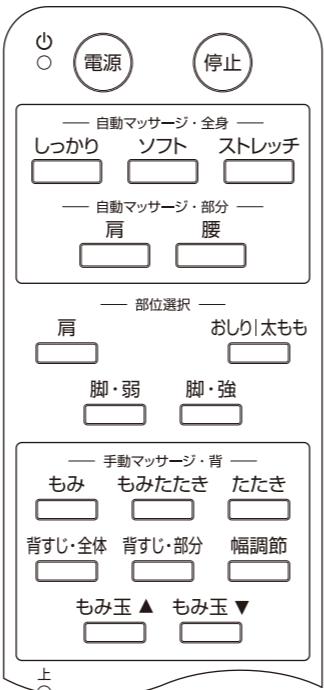

## 手動マッサージ・背

- 背すじのマッサージを単独動作(ひとつの動作)、複合動作(ふたつの動作の組み合わせ)に切り替ながら、お好みのマッサージを行っていただけます。  
単独動作 ..... [もみ] [もみたき] [たたき] [背すじ・全体] [背すじ・部分]  
(ひとつの動作)

- 複合動作 ..... [もみ] + [背すじ・全体] [もみ] + [背すじ・部分]  
(ふたつの動作の組み合わせ) [もみたき] + [背すじ・全体] [もみたき] + [背すじ・部分]  
[たたき] + [背すじ・全体] [たたき] + [背すじ・部分]

●どちらかの動作を停止させて単独動作に切り替えることもできます。

- もみ玉▲ [もみ玉▼] ボタンを使用する。  
単独動作、複合動作で [背すじ・全体] を含む動作以外のときは、  
[もみ玉▲] [もみ玉▼] ボタンでもみ玉の高さ調節が可能です。  
[もみ玉▲] ボタン ..... 押している間、もみ玉が上へ移動し、設定した肩位置で止まります。  
[もみ玉▼] ボタン ..... 押している間、もみ玉が下へ移動し、下限で止まります。

- 幅調節 ボタンを使用する。

- 単独動作 ..... [たたき] [背すじ・全体] [背すじ・部分]  
複合動作 ..... [たたき] + [背すじ・全体]  
[たたき] + [背すじ・部分]

使用時に [幅調節] ボタンで、もみ玉の左右の幅を無段階に調節することができます。  
ボタンを押している間はもみ玉の左右の幅が変化します。


- マッサージをやめたいときに(電源)ボタンを押すとマッサージ動作が止まり、電源ランプが点滅しながらもみ玉が最上部へ移動し、電源ランプが消灯します。

マッサージを急いで中止したいときに(停止)ボタンを押すと、全ての動作が停止します。

- 刺激が強すぎるときはタオルなどをあてがい、もみ玉の感触を調節してください。  
強い刺激のままで使用を続けるとけがの原因になります。
- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。  
強い刺激に慣れていないと逆効果やけがの原因になります。

## マッサージの種類と調節(手動マッサージ・背の場合)


動作	もみ玉上下調節	幅調節
[もみ]	○	—
[もみたき]	○	—
[たたき]	○	○
[背すじ・全体]	—	○
[背すじ・部分]	○	○
[もみ] + [背すじ・全体]	—	—
[もみ] + [背すじ・部分]	○	—
[もみたき] + [背すじ・全体]	—	—
[もみたき] + [背すじ・部分]	○	—
[たたき] + [背すじ・全体]	—	○
[たたき] + [背すじ・部分]	○	○

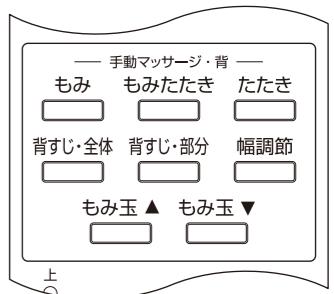

## 部位選択

1.肩、おしり|太もも、脚のエアーバッグを単独動作(ひとつの動作)、複合動作(ふたつ以上の動作)に切り替えながらお好みのマッサージを行っていただけます。

- 肩 [ ] おしり|太もも [ ] エアーバッグが加圧、減圧をくり返し動作しながらマッサージします。
- 脚・弱 [ ] 脚・強 [ ] エアーバッグが、ふくらはぎから足先まで、脚全体のマッサージを行います。
- 脚・弱 [ ] 脚・強 [ ] でエアーバッグの強さをお好みで切り替えてください。

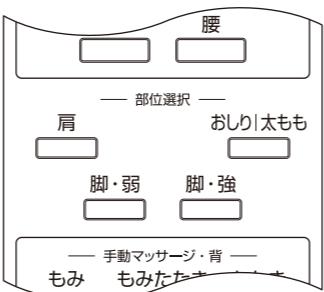

- エアーバッグが適切な位置に当たらないときは、背もたれを倒したり身体をずらして調節してください。
- 刺激が弱いときはタオルなどをあてがい、エアーバッグの感触を調節してください。

### ⚠ 注意

座らない状態でエアーバッグを動作しない。  
エアーバッグの耐久性が低下する原因になります。

## オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れを防止するため、マッサージ開始から約15分を経過すると自動でマッサージを終了します。

節電のため、マッサージ終了後、リモコン操作を行わず約4分間が経過すると、リモコンの動作表示部が自動で消灯します。

再び使用する場合は電源ボタンを押してください。

### 停電時のご注意

停電復帰時の事故やけがを防止するため、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 使い終わったら

- 1.背もたれが倒れた状態、フットレストが上がった状態の場合は、  
背もたれ(起)ボタンを押して背もたれを起こして、フットレストを下げてください。
  - 2.電源ボタンを押して電源ランプを消灯してください。
  - 3.背もたれ背面の電源スイッチを「OFF」にしてください。
  - 4.電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源ボタンで終了した場合は、電源ランプが消灯し、すべてのボタン操作ができません。  
再び操作をする場合は電源ボタンを押して電源ランプが点灯してから行ってください。

### ⚠ 注意

椅子の乗り降りは必ず、フットレストを完全に下げた状態で行う。  
転倒による事故やけが、故障の原因になります。

## スピーカーの使用方法

本品はBluetoothに対応した機器(スマートフォンなど)とワイヤレス(無線)接続して、スピーカーから音楽を聞くことができます。

### Bluetooth対応機器とペアリングする

お手持ちのBluetooth対応機器と本品をペアリング(登録)してください。

1. 対応機器のBluetoothを有効にし、接続設定で「THRIVE AUDIO」を選択します。
2. 入力画面で、PINコード(またはペアリングコード、パスコード)を入力してください。(初回時のみ設定)

コードはリモコン背面の定格シール下部に記載しています。

3. 接続が完了すると完了を知らせる音が鳴ります。

- 本品に近づいた状態で接続設定を行ってください。
- ペアリングできない場合は、本品の電源スイッチをOFFにして、再度電源を入れ直すか、Bluetooth対応機器のメニューなどから本品の登録情報をいったん解除し、再度登録をやり直してください。
- 本品とBluetooth対応機器との接続は1台のみ可能です。複数の機器を同時に接続することはできません。すでに接続中の対応機器がある場合は、設定を解除してください。
- 機器により接続設定方法が異なります。対応機器の取扱説明書をご覧ください。

### Bluetooth対応機器を再生する

1. 本品のスピーカーから音が流れます。

2. 再生をやめたいときはBluetooth対応機器の接続を解除してください。

3. 使い終わったら、本品の電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 再生、停止、音量調節などは、Bluetooth接続機器側で操作してください。  
音量は接続時は小さくし、少しずつ上げるように調節してください。  
音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然の大きな音で耳を傷める原因になります。
- 大音量で耳を刺激しないでください。  
大音量での長時間のご使用は聴力に悪影響をあたえる原因になります。
- 音量には注意し、近隣へのご配慮をお願いします。

○マッサージ機能を使用せず、Bluetooth接続のみでのご使用も可能です。

## Bluetooth®について

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を必要とする無線局)および特定小電力無線局(免許を必要としない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を必要とする無線局)が運用されています。

1. 本品を使用する前に近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変更するか、電波の使用を停止したうえ、弊社お客様ご相談センターにご連絡いただき、混信回避のための処置(パーテーションの設置など)についてご相談ください。
3. その他、本品から移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、ならびにアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合やご不明な点がございましたら弊社お客様ご相談センターまでお問い合わせください。

## Bluetooth®について

### 機器認定について

本品は電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は必要ありません。ただし、本品に以下のような行為を行うと、法律で罰せられることがあります。

- 分解、改造すること
- 本品に貼られている証明ラベルを消すこと、はがすこと

### 使用制限について

本品は日本国内でのみ使用できます。

すべてのBluetooth対応機器とワイヤレス通信を保証するものではありません。

本品と接続するBluetooth対応機器はBluetooth SIG, Inc. の定めるBluetooth標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。ただし、Bluetooth標準規格に適合していても、Bluetooth対応機器の仕様や設定によっては接続できないことがあります。操作方法や表示・動作を保証するものではありません。

本品の故障または使用によって生じた情報漏洩、保存データの消失について、弊社は一切の責任を負いかねます。

### 使用可能距離について

本品に接続するBluetooth対応機器は、見通しのよい場所で約10m以内で使用してください。

本品とBluetooth対応機器との間に障害物や近くに干渉機器がある場合、人が間に入った場合、周囲の環境や建物の構造などによって使用可能距離が短くなる場合があります。

上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

### 他の機器からの影響について

Bluetoothを搭載する機器、無線LANを使用する機器、電子レンジなど、本品と同じ2.4GHz帯を使用する機器によって通信が途切れるなどの電波干渉による障害が発生することがあります。同様に本品の電波がこれらの機器に影響をあたえる場合もあります。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

大東電機工業株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

## 使用上のご注意

合成皮革が変色や変質する原因になります。

長くお使いいただくために次の使用にご注意ください。

- 風呂あがりなど、身体が汗ばんだ状態で使用しないでください。
- 整髪料や化粧品などを付着させないでください。
- ビニールや室内の壁紙などに長時間接触させないでください。

## お手入れについて

### 本体

- 柔らかい乾いた布でふき取ってください。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯にうすめた中性洗剤を含ませた布をよくしぼってからふき、仕上げに乾いた布で水分をふき取ってください。

### 布部分

- ぬるま湯にうすめた中性洗剤を含ませた布をよくしぼってからふき取ってください。
- 仕上げに水を含ませ、よくしぼった布でふき取ってください。

### リモコン

- 柔らかい乾いた布でふき取ってください。



お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯、アイロンやドライヤーは使用しない。  
変色・変形の原因になります。

## 保管について

- 電源プラグをコンセントから抜き、アース線を取りはずしてください。
- 汚れやホコリを取り、湿気が少なく直射日光があたらない場所に保管してください。
- 電源コードやリモコンコードは、ねじれをほどいて保管してください。

## 故障かなと思ったら

点検、修理を依頼される前に下記のご確認をお願いします。

症 状	調べるところ
●もみ玉と布がする音 ●張地とその他がする音 ●マッサージ動作時のモーター音 ●エアーマッサージ中の加圧および減圧の音 ●背もたれボタン、もみ玉上下調節ボタンの使用時のタイムラグが大きい	●構造上のもので機能などに影響はありません
●もみ玉が止まる	●無理な力がかかるついませんか 下記「安全装置について」を参照
●エアーバッグが加圧をしない、または弱い	●エアーチューブが完全に接続されていますか
●動作しない、動作が止まる	●リモコンの電源ボタンは押していますか ●リモコンの電源ランプはついていますか ●電源プラグが抜けていますか ●電源スイッチが「OFF」になっていますか ●オートタイマーが働き停止状態になっていますか

症 状	直し方
●動作せずリモコンのランプが点滅する	●電源プラグを差し直してください (外れ雑音による、誤動作が考えられます)
●連続使用時にマッサージが止まる (リモコンランプは点灯している)	●モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています しばらく本体を休ませて(1時間程度)から再度動作を確認してください
●ペアリングできない	●Bluetooth対応機器のメニューなどから本品の登録情報をいったん消去し、再度登録をやり直してください ●本体の電源スイッチをOFFにして、再度電源を入れ直してください ●接続中のBluetooth対応機器がある場合は設定を解除してください (接続は1台のみ可能で、複数の機器を同時に接続することはできません) ●仕様欄(P15)にあるBluetoothのバージョン、プロファイルに対応した機器を使用してください
●音が飛ぶ、途切れる、雑音がする	●本品とBluetooth対応機器の距離を近づけてください ●障害物を避けて使用してください

機器に異常音や動作しないなどの異常や故障が発見された場合は、ただちに使用を中止してください。  
電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。

### 安全装置について


もみ玉に無理な力がかかると安全装置が働き動作が止まることがあります。そのときは一度電源スイッチを「OFF」にし、少し時間を置いてから再度電源スイッチを「ON」にしてください。特に体重100kg以上の方は身体を浮かせ気味にしてお使いください。

## 愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。



- このような症状はありませんか。
- こげくさいにおいがある
  - 電源コード、プラグが異常に熱い
  - コードを動かすと通電したり、しなかつたりする
  - その他異常がある

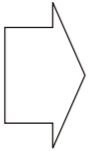

故障や事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理をご相談ください。

## 仕様

### 製品本体

販売名	マッサージチェア CC-95
医療機器認証番号	304AHBZX00032000
医療機器の種類	管理医療機器
一般的な名称	家庭用電気マッサージ器
定格	AC100V 50/60Hz 71W
定格時間	20分
オートタイマー	約15分
肩位置調節	5段階
もみ玉幅調節	無段階
もみ回数(背面)	約22回/分
たたき回数(背面)	約330回/分
背すじ全体速さ(往復)	約78秒
背すじ全体移動距離(最長)	約70cm
背すじ部分移動距離	約10cm
エアーマッサージ空気圧	80kPa以下
背もたれ角度	約113°～約137°
外形寸法	背もたれ 起きた状態/フットレスト 下げた状態 幅 約78cm×奥行 約116cm×高さ 約106cm 背もたれ 倒れた状態/フットレスト 上げた状態 幅 約78cm×奥行 約155cm×高さ 約87cm
質量	約42kg
電源コード長さ	約2m
張地	合成皮革、ポリエステル
付属品	ヘッドレスト、座クッション、ひじ掛けパネル
製造販売元	大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

### Bluetooth部

バージョン	Ver.5.2
送信出力	Class2
対応プロファイル	A2DP
対応コーデック	SBC
使用周波数帯	2.4GHz帯(2402～2480MHz)
見通し通信距離	約10m

## アフターサービスについて

### ● 保証書(裏表紙)

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

### ● 保証期間中に修理を依頼される場合

保証書の記載内容に従って修理いたします。

### ● 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### ● 補修用性能部品の最低保有期間

弊社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。(ただし、縫製部品は除きます)。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ● その他ご不明な場合

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

# お客様ご相談センターのご案内

製品の返品・返金などについては、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

製品のお取り扱い方法、修理などのご相談は

フリーダイヤル

 0120-064-762

※お客様がご加入されている電話(NTT以外の一般回線、IP電話など)によっては、ご利用できない場合がございます。

上記番号がご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください。

**TEL 086-722-3482**

**FAX 086-722-5055**

岡山大東電機工業株式会社  
〒709-3104 岡山県岡山市北区建部町角石谷 1503-1

**【受付時間(祝日を除く月～金)9:00～17:00】**  
都合によりお休みさせていただくことがあります。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。

## 〈無料修理規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店または、P17のお客様ご相談センターが無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店または、P17のお客様ご相談センターに依頼してください。
3. ご転居の場合には事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、P17のお客様ご相談センターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷  
(ロ) お買い上げ後の取扱場所の移動、落下などによる故障および損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷  
(ニ) 一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合の故障および損傷  
(ホ) 本書の提示がない場合  
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合  
(ト) 指定外電源(電圧・周波数)使用による損傷
6. 本書は国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## 修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または、P17のお客様ご相談センターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはP16をご覧ください。

**THRIVE**  
スライヴ

# 保証書

出張修理

## マッサージチェア CC-95

お買い上げ日	保証期間
年 月 日	お買い上げ日より1年間

お客様	
フリガナ	
お名前	様
住所	〒
電話番号	
販売店	
大東	

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売などで購入された場合は、製品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げ販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

P18の無料修理規定をご覧ください。

製造販売元

**大東電機工業株式会社**

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38