

THRIVE

234パターンの
プロの手わざが全身をほぐす、
至福のリラックスタイム。

横回転もみ玉や、25個のエアバッグが、
肩、腕、おしり・太もも、脚、足裏など、
まるで人の手のような感覚でマッサージします。



くつろぎ指定席

マッサージチェア CHD-9124



(IV) アイボリー



(BK) ブラック
2024年11月発売予定



3種類の自動マッサージと各部をケアできる手動マッサージ。

THRIVE
スライヴ

自動マッサージ

施療部を効果的にマッサージするようにあらかじめ設定された3種類の自動マッサージから選べます。

コース選択

- **全身** 背中全体をマッサージ
- **肩** 肩を重点的にマッサージ
- **腰** 腰を重点的にマッサージ

3種類の自動マッサージは【もみ】【もみたたき】【背すじ全体】【背すじ部分】の単独、複合動作します。エアーマッサージは好みで切り替えることができます。

手動マッサージ

背すじマッサージ【もみ】【もみたたき】【背すじ全体】【背すじ部分】の単独、複合動作が選べます。

単独動作(ひとつの動作)

- **もみ**
- **もみたたき**
- **背すじ全体**
- **背すじ部分**

複合動作(ふたつの動作)

- **もみ** + **背すじ全体**
- **もみ** + **背すじ部分**
- **もみたたき** + **背すじ全体**
- **もみたたき** + **背すじ部分**

- 肩位置の設定: もみ玉の位置を5段階から選択できます
- 幅調節: もみ玉の左右の幅を無段階に調節できます
- もみ玉上下調節: もみ玉の位置を上下調節できます
- オートタイマー: 動作開始から約15分で自動的に止まります

234パターンで全身マッサージ



くつろぎ指定席

マッサージチェア CHD-9124

エアーマッサージ

肩、腕、おしり・太もも、脚、足裏のエアーバッグを単独、複合動作に切り替えながらマッサージを行います。

- ① **肩**
 - ② **腕**
 - ③ **おしり・太もも**
 - ④ **脚**
 - ⑤ **足裏** **新機能**
- エアーマッサージ: エアーバッグが加圧、減圧を繰り返しながらマッサージ
- 足裏: エアーバッグが、ローラーを前後に動かしながらマッサージ

背もたれ角度は約120°~約145°の間で調節できます。



フットレスト延伸
最大で約33cm前方へ押し出すことが可能。



(IV) アイボリー




仕様

- 販売名: マッサージチェア CHD-9124 ●医療機器認証番号: 306AHBZX00022000
- 医療機器の種類: 管理医療機器 ●一般的な名称: 家庭用電気マッサージ器 ●定格: AC100V 50/60Hz 71W ●定格時間: 20分 ●オートタイマー: 約15分 ●肩位置調節: 5段階 ●もみ玉幅調節: 無段階 ●もみ回数(背面): 約20回/分 ●たたき回数(背面): 約405回/分 ●背すじ全体速さ(往復): 約85秒 ●背すじ全体移動距離(最長): 約64cm ●背すじ部分移動距離: 約12.5cm ●エアーマッサージ空気圧: 80kPa以下 ●質量: 約36kg ●電源コード長さ: 約2m ●張地: 合成皮革、ポリエステル ●付属品: ヘッドレスト、座クッション、リモコンスタンド
- 製造販売元: 大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
- JANコード: (IV) アイボリー-4975287700447 (BK) ブラック4975287700577
- オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください)

使用目的または効果: あんま・マッサージの代用 ●疲労回復・血行をよくする・筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解 ●一般家庭で使用すること

外形寸法

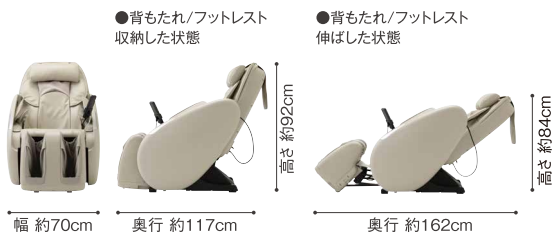

●開梱時本体寸法

68cm x 70cm x 91cm

●梱包時1台箱寸法・重量
幅 約74cm x 奥行 約96cm x 高さ 約73cm ●約41kg

背もたれが倒れた状態で梱包されていますので、スムーズな搬入が可能です。設置場所までの搬入経路をご確認ください。

安全上のご注意 ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●けんしゅう(腱鞘)炎の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●その他医療機関で治療中の人 ●事故や体調不良の原因になります。使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。その他の部分にも破れがないか確認する(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)。●けがや感電の原因になります。次の人は使用しない。医師からマッサージを禁じられている人。(例: 血栓(塞栓)症、重度の動脈粥状硬化(動脈硬化)、急性静脈血栓(血栓)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) ●症状を悪化させる原因になります。次のようなときは使用しない。●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき ●体調不良をおこす原因になります。乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせない。安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。●事故やけがの原因になります。機器が故障した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡してください。

お求めは当店へどうぞ……

製造販売元
大東電機工業株式会社
〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号
お問い合わせは お客様ご相談センター
受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)
ナビダイヤル **0570-064-762**
一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。



daito-thrive.co.jp



表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を
推進しています。